

Sondeernæring med pumpe




Ernæringspumpe og ernæringssett anbefales til de fleste som får sondemat, fordi pumpen kan stilles inn på hastighet og mengde. Sondeernæring med Flocare Infinity pumpe er enkelt, trygt og tidsbe-

sparende. Fjern og spar på støvhetten på enden av ernæringssettet. Rulleklemmen åpnes langsomt og slangen fylles med sondemat. Lukk rulleklemmen.

TILKOBLING VED NY FLASKE + SETT

1.  Åpne hetten på sonde-matflasken.	2.  Sett sondematen slik at åpningen vender oppover. Koble ernæringssettet til flasken.	3.  Skru ernæringssettet fast på flasken med sondeernæring.
4.  Heng opp sondematen. Bruk evt. et stativ.	5.  Åpne dekelet på pumpen.	6.  Plasser ernæringssettet i pumpen.
8.  Lukk dekelet på pumpen. Åpne rulleklemmen og skru på pumpen.	9.  Trykk FILL SET på pumpen og la sondematen gå gjennom ernæringssettet.	10.  Fjern beskyttelseshetten fra konnektoren på ernæringssettet.
		11.  Skru ernæringssettet sammen med sondens konnektor.

INNTAK AV SONDEMAT

12.  Trykk på START/STOP på pumpen.	13.  Velg ønsket program på pumpen. Se brukerveiledning på baksiden av pumpen for mer informasjon.	14.  MELLOM MÅLTIDER. Trykk [info] og deretter [clear] på pumpen.
---	--	---

KOBLE FRA




15.  Trykk på START/STOP på pumpen.	SONDEN SKYLLES PÅ EN AV FØLGENDE MÅTER (16 EL. 17)	
17.  Åpne 3-veisporten. Skyll gjennom sonden med en sprøyte med 20-50 ml vann. Lukk 3-veisporten.	18.  Koble ernæringssettet konnektor fra sondens konnektor, og sett beskyttelseshetten på sonden.	19.  Sett på hetten på ernæringssettets konnektor.
	20.  Skru av pumpen (Trykk på ON/OFF) knappen. (Pumpen husker dataene dine ved neste måltid).	

Sondeernæring med ernæringssett uten pumpe


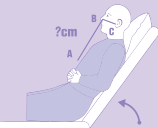
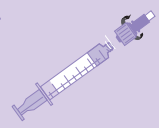

1. Koble ernæringssettet på sondeflasken, slik som på bilde 1-3 i brukerveiledningen til venstre. Spissen på enden av ernæringssettet perforerer folien på innsiden av korken på flasken.
 2. Kontroller at rulleklemmen på ernæringssettet er lukket.
 3. Heng flasken opp på et stativ eller lignende og bruk et Flocare gravitasjonssett (tyngdekraft).
 4. Fjern og spar på støvhetten på enden av ernæringssettet. Rulleklemmen åpnes langsomt og slangen fylles med sonde-
 5. mat. Lukk rulleklemmen.
 6. Koble ernæringssettet med sonden (ved knapp: koble ernæringssettet med forlengingsslange).
 7. Start sondeernæringen ved å kontrollere dråpehastigheten i dråpekammeret og juster ved hjelp av rulleklemmen.
 8. Når måltidet er ferdig, stenges rulleklemmen.
- MERK!** Husk alltid å SKYLLE ernæringssettet etter matning, for å unngå at ernæringssettet går tett.

Sondeernæring (bolus) med ernærings-sprøyte

SONDEERNÆRING - MED ERNÆRINGS-SPRØYTE

1.  Skru en Flocare bolusadapter på sondeernæringen. Vend på sondeernæringsflasken før bruk.	2.  Skyll gjennom sonden med 20-50 ml vann før sondematingen.	3.  Sondeernæringen bør alltid gis romtemperert, ikke kald fra kjøleskapet. Trekk opp anbefalt mengde sondeernæring i ernærings-sprøyten.
---	--	--

For alle sondeernæringsmetoder gjelder:

1.  Sondeernæring skal gis i et tidsintervall på minimum 20 minutter.	2.  Når barnet får sondeernæring og 1/2 time etter måltidet, skal overkroppen være i minst 45 graders vinkel - dvs. barnet skal sitte opp, ligge med løftet hodegavl eller støttet opp med puter.	3.  Før hvert måltid skal plasseringen på nasogastriske sonde kontrolleres. Før og etter hvert måltid skylles sonden gjennom med 20-50 ml vann og lukkes.	4.  Sondeernæringen settes i kjøleskap etter bruk. Holdbarhet i kjøleskap med bolusadapter er 24 timer.
--	--	--	--